

Manual do Proprietário

Autoclaves

19L



3L



12LX



Accese la versión en Español deste manual
aquí: www.dabi.com.br/esp/prod_manual/autoclave

DABI ATLANTE

A marca do Brasil

Autoclave 3L

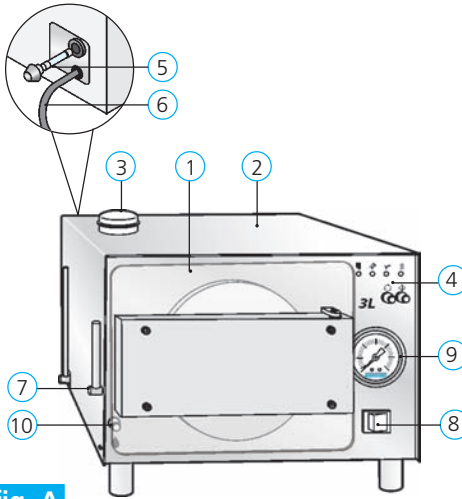


fig. A

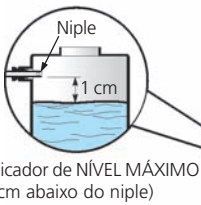


fig. B

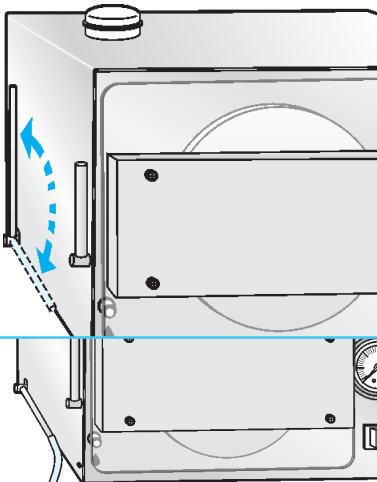


fig. C

fig. D

Autoclave 12LX

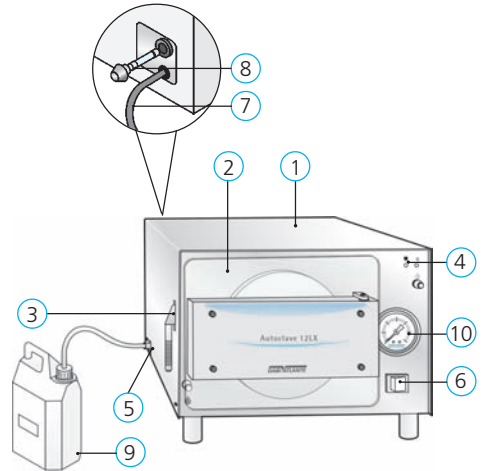


fig. E

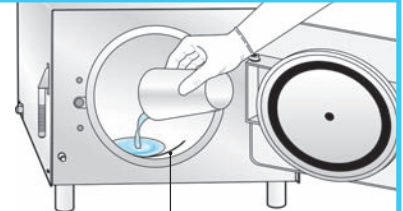


fig. F

Painel 3L


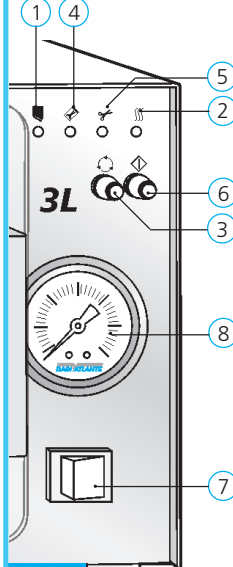


fig. G

Painel 12LX

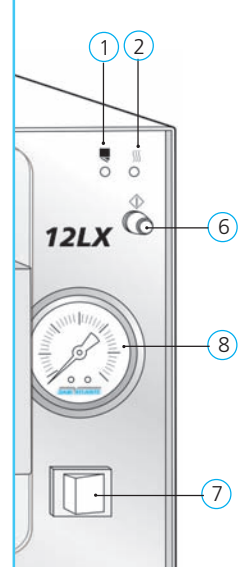

Autoclave 19L

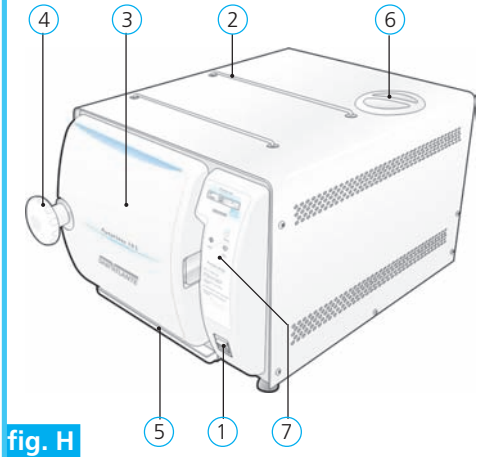


fig. H

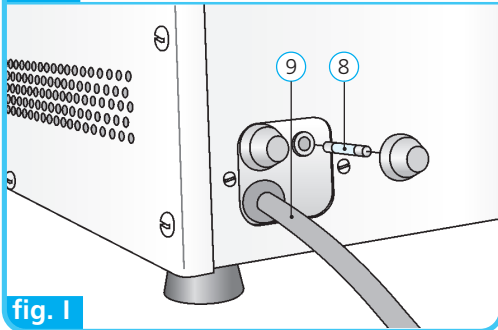


fig. I

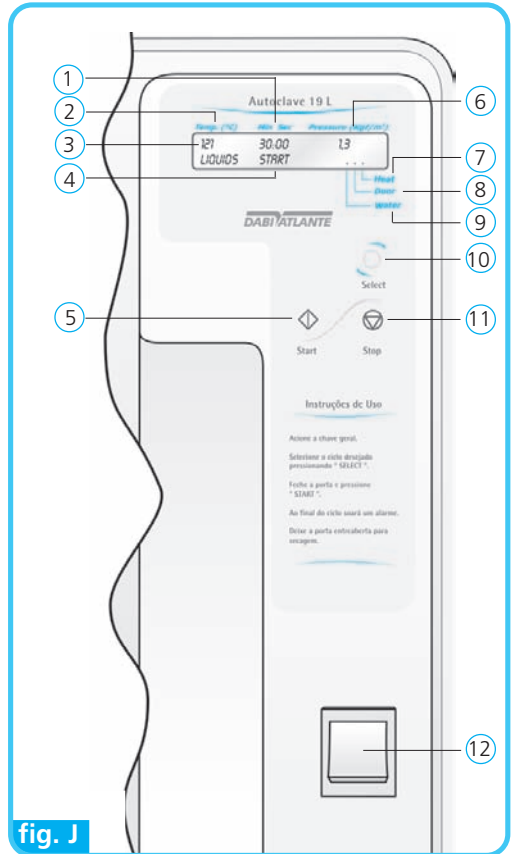


fig. J

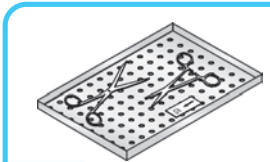


fig. K

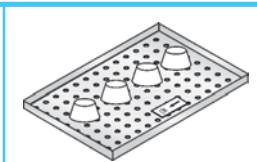


fig. L

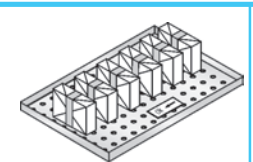


fig. M

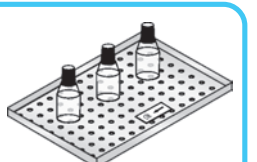


fig. N

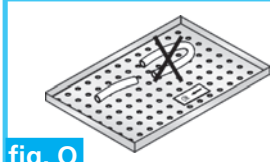


fig. O

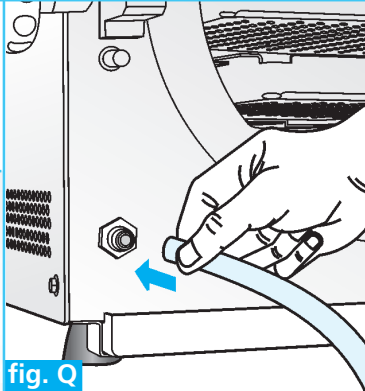


fig. Q

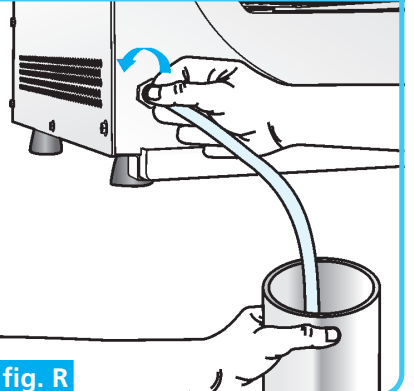


fig. R

Conteúdo

| | |
|--|-----------|
| Legenda | 04 |
| Autoclave 3L | 04 |
| Autoclave 12LX | 04 |
| Autoclave 19L | 04 |
| Descrição do Painei | 04 |
| Instalação | 05 |
| Procedimentos antes da utilização/ reutilização do equipamento | 05 |
| Preparação dos materiais | 05 |
| Antes de operar | 05 |
| Operação | 05 |
| Dicas para uma boa esterilização | 06 |
| Descarga de pressão | 06 |
| Drenagem de água | 06 |
| Limpeza | 06 |
| Tabela de esterilização | 07 |
| Comandos eletrônicos | 07 |
| Manutenção | 07 |
| Recomendações, cuidados e advertências ... | 07 |
| Precauções em caso de alteração do funcionamento do equipamento | 08 |
| Sensibilidade a condições ambientais previsíveis nas situações normais de uso ... | 08 |
| Precauções em caso de inutilização do equipamento | 08 |
| Condições de transporte e armazenamento .. | 08 |
| Após a instalação | 08 |
| Preparação antes da entrega | 08 |
| Rede de Serviços Autorizada Dabi Atlante .. | 08 |
| Simbologia | 08 |
| Recomendações finais | 09 |
| Garantia do equipamento | 09 |
| Características técnicas | 09 |
| Falhas, causas e soluções | 10 |

Apresentação

Prezado Cliente,

Seja bem Vindo!

Estamos orgulhosos de sua opção por nosso produto. O conhecimento das **Autoclaves Dabi Atlante** potencializa seu desempenho e aumenta a sua durabilidade e benefícios. Portanto, antes de utilizá-las leia atentamente este Manual.

Importante

Todas as informações, ilustrações e especificações deste Manual foram baseadas em dados existentes na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto, quanto neste Manual, sem prévio aviso.

Legenda

Autoclave 3L (fig. A)

- 1 Porta
- 2 Gabinete da Autoclave
- 3 Tampa do reservatório de água
- 4 Painei
- 5 Fusível
- 6 Cabo de alimentação elétrica
- 7 Pino para destravamento da porta
- 8 Chave Liga/Desliga
- 9 Manômetro
- 10 Tecla de enchimento da câmara

Autoclave 12LX (fig. E)

- 1 Gabinete da Autoclave
- 2 Porta
- 3 Alavanca de abertura
- 4 Painei
- 5 Saída da exaustão
- 6 Chave Liga/Desliga
- 7 Cabo de alimentação elétrica
- 8 Fusível
- 9 Galão de descarte da exaustão
- 10 Manômetro

Autoclave 19L (fig. H e I)

- 1 Chave Liga/Desliga
- 2 Apoios para bandeja
- 3 Porta
- 4 Manípulo
- 5 Bandeja coletora de água
- 6 Tampa do reservatório de água
- 7 Painei
- 8 Fusível
- 9 Cabo de alimentação elétrica

Descrição do painei

Modelos 3L e 12LX (fig. G)

- 1 **LED Door (3L e 12LX)** - Indica se a porta está aberta (LED aceso) ou fechada (LED apagado).
- 2 **LED Heat (3L e 12LX)** - Indica se a resistência está ligada ou desligada.
- 3 **Tecla Select (3L)** - Seleciona o ciclo de esterilização.

- 4 **LED Pouches (3L)** - Indica que o ciclo para esterilização de material embalado está selecionado.
- 5 **LED Unwrapped (3L)** - Indica que o ciclo para esterilização de material não embalado está selecionado.
- 6 **Tecla Start (3L e 12LX)** - Inicia o ciclo previamente selecionado.
- 7 **Chave Liga/Desliga** - (3L e 12LX) - Liga e desliga o equipamento.
- 8 **Manômetro Indicador de Pressão / Temperatura (3L e 12LX)** - Indica a pressão e temperatura dentro da câmara (tanque) de esterilização.

Modelo 19L (fig. J)

- 1 *Display* indicador de tempo
- 2 *Display* indicador de temperatura
- 3 *Display* indicador de ciclo
- 4 *Display* indicador de fase
- 5 Tecla *Start*
- 6 *Display* indicador de pressão
- 7 *Heat*
- 8 *Door*
- 9 *Water*
- 10 Tecla *Select*
- 11 Tecla *Stop*
- 12 Chave Liga/Desliga

Instalação

Este equipamento deve ser desembalado e instalado por um técnico autorizado Dabi Atlante, sob pena de perda da garantia.

Procedimentos antes da utilização/reutilização do equipamento

Antes de sua utilização/reutilização, siga as instruções de operação e limpeza contidas neste Manual.


Preparação dos materiais

Lave os instrumentos imediatamente após o uso, recomendamos que os instrumentos sejam lavados com limpador ultra-sônico, usando solução de detergente e água destilada.

Enxágüe-os por 30 segundos e seque-os.

Antes de operar

3L e 19L - Coloque água no reservatório até o nível máximo.

 Use somente água destilada ou desmineralizada, para evitar danos prematuros na câmara de aço inoxidável ou entupimento dos sistemas de abastecimento de água.

Operação

Modelo 3L

Ligue a chave Liga/Desliga.

Selecione o ciclo de esterilização adequado através da tecla *Select* (fig. G, 3) (verifique o tópico “Tabela de esterilização”).


Encha a câmara mantendo pressionada a tecla de enchimento (fig. A, 10) para liberar a passagem da água, e quando atingir a marca indicada no tanque, solte a tecla, para fechar a válvula.

Feche a porta da **Autoclave** firmemente, verificando se o *LED Door* se apaga (fig. G, 1).

Pressione a tecla *Start* para iniciar o ciclo (fig. G, 6).

O *LED Heat* (fig. G, 2) ficará piscando por 90 segundos, até a saída do ar frio de dentro da câmara. Terminado o tempo a válvula se fecha e o *LED* permanecerá aceso.

Atingindo a temperatura/pressão de esterilização, o *LED* indicador da seleção de ciclo começará a piscar indicando início da esterilização.

 Durante o ciclo de esterilização ocorrerão descargas controladas do excesso de pressão para manter a mesma dentro do valor especificado para o ciclo.

Ao final do ciclo, ocorrerá a exaustão automática, o manômetro de pressão irá zerar e a **Autoclave** emitirá um sinal sonoro (5 *bips*).

Ocorrerá o destravamento automático da porta, ficando “Entreaberta” para o processo de secagem.

Modelos 12LX

Ligue a chave Liga/Desliga.

O ciclo de esterilização nesse modelo é único.


Encha a câmara com água destilada utilizando o copo dosador até a marca indicada no tanque (fig. F).

Feche a porta da **Autoclave** firmemente, verificando se o *LED Door* se apaga (fig. G, 1).

Pressione a tecla *Start* para iniciar o ciclo (fig. G, 6).

O *LED Heat* (fig. G, 2) ficará piscando por 180 segundos, até a saída do ar frio de dentro da câmara. Terminado o tempo a válvula se fecha e o *LED* permanecerá aceso.

Atingindo a temperatura/pressão de esterilização, o *LED Start* começará a piscar indicando início da esterilização.

 Durante o ciclo de esterilização ocorrerão descargas controladas do excesso de pressão para manter a mesma dentro do valor especificado para o ciclo.

Ao final do ciclo, ocorrerá a exaustão automática, o manômetro de pressão irá zerar e a **Autoclave** emitirá um sinal sonoro (5 *bips*).

Para o processo de secagem, abra a porta manualmente (pela trava da porta) deixando-a entreaberta (fig. E, 3). Verifique antes no manômetro se a pressão está zerada.

Modelo 19L

Ligue a chave Liga/Desliga.

Selecione o tipo de esterilização adequado através da tecla *Select* (fig. J, 10) (verifique o tópico “Tabela de esterilização”).

Feche a porta girando o manípulo no sentido horário, até apagar o indicador *Door* (fig. J, 8), dê mais uma volta completa no manípulo.

Pressione a tecla *Start* (fig. J, 5).

No *display* aparecerá *Filling* e o *LED Water* (fig. J, 9) ficará aceso até completar o preenchimento da água na câmara.

O *display* indicará *Heating* e o *LED Heat* (fig. J, 7) ficará piscando indicando a fase de aquecimento até a temperatura do ciclo selecionado.

Ao atingir a temperatura de esterilização o *display* indicará *Steriliz*, indicando a fase de esterilização. A contagem do tempo de esterilização será regressiva.

Ao final do ciclo ocorrerá automaticamente a exaustão do vapor e da água da câmara, durante esse processo o *display* indicará *Discharg*.

Quando o *display* de pressão zerar, aparecerá a mensagem *Opendoor*.

Para a secagem, abra a porta, girando o manípulo no sentido anti-horário deixando-a entreaberta, aparecerá a mensagem *Drying* no *display* e o tempo de secagem (30 minutos) será contado de forma regressiva. Quando o ciclo de secagem terminar um *bip* soará por 4 segundos.

Dicas para uma boa esterilização

Não coloque instrumentos de materiais diferentes na mesma bandeja.

Para a esterilização de materiais de aço carbono, coloque-os em uma bandeja de aço inoxidável forrada com uma toalha.

Esterilize os instrumentos em posição aberta (fig. K).

Coloque um indicador químico de esterilização em cada bandeja ou pacote.

Utilize um indicador biológico de teste com esporos no objeto que será esterilizado, pelo menos 1 vez por semana.

Coloque os recipientes vazios com a parte superior para baixo, evitando acúmulo de água em seu interior. (fig. L)

Não sobrecarregue a bandeja de esterilização, pois causará esterilização inadequada.

Deixe uma distância de aproximadamente 25mm entre as bandejas para permitir a circulação de vapor.

Embrulhe os instrumentos em materiais que permitam a secagem (sacos de autoclave, papel de autoclave e toalha de musselina).

Para esterilizar tubos, limpe-os com álcool para facilitar a secagem interna e externa, coloque-os na bandeja com ambos os lados abertos, sem pontas dobradas ou torcidas. (fig. O)

Para esterilizar pacotes, coloque-os na posição vertical

na bandeja, lado a lado. Os pacotes não devem tocar as paredes da cuba. (fig. M)

Para esterilizar líquidos use apenas vidro à prova de calor, preenchido com o máximo 2/3 de sua capacidade. Os recipientes de vidro devem estar fechados mas não selados, para evitar que a pressão os destrua. (fig. N)

Descarga de pressão

Modelos 3L e 12LX

Não é necessária, pois a válvula é acionada eletricamente, e se acabar a energia ou a máquina for desligada em sua chave Liga/Desliga, a pressão será automaticamente eliminada pela ação de abertura da válvula.

Quando ocorrer queda de energia ou desligamento incorreto da **Autoclave**, após a descarga automática da pressão, os LEDs ficarão piscando quando a **Autoclave** for religada. Para voltar ao normal, pressione a tecla *Start* e reinicie novo ciclo.

Modelo 19L

Se for necessário interromper o ciclo da **Autoclave** por qualquer motivo, pressione a tecla *Stop* que a **Autoclave** começará a descarregar a pressão. Após isso o sistema voltará a condição anterior.

Em caso de queda de energia não haverá descarga automática da pressão por tanto é necessária a descarga manual. Para isso, puxe o acesso à válvula de segurança dentro do reservatório de água. (fig. P).

Se após o final de um ciclo a porta for fechada com a máquina ainda quente, esta pode não abrir após algum tempo, para isso, ligue a chave Liga/Desliga, para depressurizar a câmara, liberando assim a porta.

Drenagem de água

Autoclave 3L

Retire a tampa do cano do dreno (fig. C) com a **Autoclave** desligada e encaixe a mangueira.

Abra o dreno girando até a posição horizontal e coloque um recipiente para a coleta de água. (fig. C e D)

Para fechar, faça a operação inversa.

Autoclave 19L

Com a **Autoclave** desligada, encaixe a mangueira no dreno (fig. Q).

Coloque um recipiente para a coleta da água.

Abra o dreno girando no sentido anti-horário a peça sextavada (fig. R)

Para fechar, faça a operação inversa.

Limpeza


Com a **Autoclave** desligada e fria, faça a limpeza.

Limpe as partes externas com um pano umedecido com Aplic Odonto, em seguida utilize um pano umedecido com água nas partes em inox (**Autoclaves 3L e 12LX**).

Limpe as partes internas com um pano umedecido com Limp Clave.

Se a água do reservatório estiver turva, troque-a.

Retire o acúmulo de água na bandeja coletora (**Autoclave 19L**).

 Não recomendamos o uso de outros produtos químicos.

Mensalmente

Modelo 3L

Drene a água do reservatório de água (verifique o tópicó "Drenagem de água").

Coloque 100 ml de Limp Clave no reservatório e complete com água destilada e desmineralizada até o nível máximo (1 litro).

Realize um ciclo longo de autoclavagem.

Drene a água.

Complete o reservatório com água destilada, e realize um ciclo curto.

Drene a água, complete o reservatório novamente e realize mais um ciclo curto de autoclavagem.

Modelo 12LX

Coloque 20ml de Limp Clave no copo dosador e complete até o nível máximo com água destilada e desmineralizada.

Coloque a solução na câmara da autoclave.

Realize 1 ciclo de autoclavagem.

Abasteça a câmara com água e realize outro ciclo de autoclavagem.

Repita o passo anterior.

Modelo 19L

Drene a água do reservatório (verifique o tópicó "Drenagem de água").

Coloque 200 ml de Limp Clave no reservatório e complete com água destilada e desmineralizada até o nível máximo (2 litros).

Realize um ciclo longo de autoclavagem.

Drene a água.

Complete o reservatório com água destilada, e realize um ciclo curto.

Drene a água, complete o reservatório novamente e realize mais um ciclo curto de autoclavagem.

Tabela de esterilização

Autoclave 3L

| Material | Temperatura | Tempo |
|--|-------------|---------|
| Instrumentos desembalados e quaisquer outros itens para os quais o tempo de esterilização seja adequado. | 134°C | 4 min. |
| Instrumentos embalados e quaisquer outros itens para os quais o tempo de esterilização seja adequado. | 134°C | 8 min. |
| Tempo mínimo de secagem | - | 5 min. |
| Tempo mínimo entre ciclos | - | 10 min. |

Autoclave 12LX

| Material | Temperatura | Tempo |
|--|-------------|---------|
| Instrumentos embalados, desembalados e suporte para bandejas, borrachas, tubos e quaisquer outros itens para os quais esta temperatura seja adequada | 134°C | 8 min. |
| Tempo mínimo de secagem | - | 20 min. |
| Tempo mínimo entre ciclos | - | 10 min. |

Autoclave 19L

| Material | Temperatura | Tempo |
|--|-------------|---------|
| Instrumentos desembalados, vidros abertos ou recipientes de metal e quaisquer outros itens para os quais tal temperatura seja adequada | 127°C | 6 min. |
| Instrumentos embrulhados e suporte para bandejas, borrachas, tubos e quaisquer outros itens para os quais esta temperatura seja adequada | 131°C | 15 min. |
| Pacotes e quaisquer outros itens para os quais esta temperatura seja adequada | 134°C | 15 min. |
| Líquidos e quaisquer outros itens para os quais esta temperatura seja adequada | 121°C | 30 min. |
| Secagem | 130°C | 30 min. |

Comandos eletrônicos



Pressione para iniciar a operação



Pressione para interromper o ciclo da autoclave



Pressione para selecionar o tipo de esterilização

Manutenção

Manutenção preventiva

Para reduzir a probabilidade de falha e aumentar a vida útil de seu equipamento, procure uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante e faça um plano regular de manutenção preventiva.

Manutenção corretiva

Caso o equipamento apresente alguma anormalidade não relacionada no tópicó "Falhas, causas e soluções" deste Manual, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante.



Não abra o equipamento e/ou tente consertá-lo. Isto pode agravar o problema ou até gerar outras falhas.

Esquema de circuito, listas de peças, componentes e outros

Caso seja necessário, solicite à Dabi Atlante esquemas elétricos e/ou listas de peças, componentes ou outras informações, os quais serão fornecidos mediante acordo.

Recomendações, cuidados e advertências

Desconecte o *plug* da tomada e desligue o disjuntor quando o equipamento permanecer sem uso.

Nunca abra a porta da **Autoclave** sem antes verificar se a pressão está abaixo de zero.

Não acione duas teclas ao mesmo tempo.

Tome cuidado para não molhar o *plug* ou a tomada. Isso pode causar curto-circuito.

Não esterilize em sua **Autoclave** substâncias voláteis e materiais que podem causar condições tóxicas ou explosivas.

Tome cuidado com as superfícies quentes da **Autoclave** e dos materiais.

Mantenha distância da porta quando a mesma estiver entreaberta para secagem. Queimaduras podem ocorrer devido à liberação de vapor quente.

O fio terra não deve ser ligado ao fio neutro da rede elétrica, canos de água, canos de gás, tubos PVC, etc.

Precauções em caso de alteração do funcionamento do equipamento

Se o equipamento apresentar alguma anormalidade verifique se o problema está relacionado a algum item listado no tópico "Falhas, causas e soluções". Se não for possível solucionar o problema, desligue o equipamento, retire o cabo de alimentação de energia da tomada e solicite os serviços de uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante.

Sensibilidade a condições ambientais previsíveis nas situações normais de uso

Este equipamento não é sensível a interferências magnéticas, elétricas, eletrostáticas e de pressão, desde que sejam observados os itens de instalação, limpeza, manutenção, transporte e operação deste Manual.

Precauções em caso de inutilização do equipamento

Ao ser inutilizado, o equipamento deve ser descartado em local apropriado (de acordo com a legislação local vigente), evitando a contaminação ambiental ou o uso inadequado do mesmo.

Condições de transporte e armazenamento

O equipamento deve ser transportado e armazenado:

- Com cuidado para evitar quedas e impactos;
- Com o lado da seta para cima;
- Observando-se os limites de empilhamento máximo indicado na embalagem;
- Protegido contra umidade, chuvas, respingos de água e solo molhado.

Condições ambientais de transporte/armazenamento

| | |
|--|---|
| Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento | 0°C a + 55°C |
| Faixa de umidade relativa de transporte ou armazenamento | 0% a 90% (não condensante) |
| Faixa de pressão atmosférica | 500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg) |

Após a instalação

Manter o equipamento em local protegido de chuva e sol.

Condições ambientais de operação

| | |
|---|--|
| Faixa de temperatura ambiente de funcionamento | +10°C a +35°C |
| Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Dabi Atlante | +21°C a + 26°C |
| Faixa de umidade relativa de funcionamento | 30% a 75% (não condensante) |
| Faixa de pressão atmosférica | 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg) |

Condições ambientais de acondicionamento (entre as operações)

| | |
|---|--|
| Faixa de temperatura ambiente de acondicionamento | +5°C a +45°C |
| Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Dabi Atlante | +15°C a +30°C |
| Faixa de umidade relativa de acondicionamento | 30% a 75% (não condensante) |
| Faixa de pressão atmosférica | 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg) |

Preparação antes da entrega

O seu novo produto Dabi Atlante foi revisado de acordo com o programa de inspeção Controle de Qualidade Dabi Atlante, para proporcionar a você o máximo de desempenho.



Rede de Serviços Autorizada Dabi Atlante

A instalação e todos os serviços de manutenção nos equipamentos Dabi Atlante deverão ser feitos por meio de uma Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante, caso contrário o equipamento terá sua garantia comprometida.

Utilize o encarte anexo ou o site www.dabi.com.br para encontrar a Assistência Técnica Autorizada Dabi Atlante mais próxima.

Simbologia

Utilizar os ícones abaixo para identificar a simbologia de seu equipamento.

| | |
|---|--|
|  | "Fragil" Localizado na lateral da embalagem, determina que o transporte deve ser feito com cuidado, evitando a ocorrência de quedas ou batidas. |
|  | "Proteger contra umidade" Localizado na lateral da embalagem, determina que durante o transporte e o armazenamento, haja proteção contra qualquer tipo de umidade. |

| | |
|--|--|
| | <p>“Face superior nesta direção”</p> <p>Localizado na lateral da embalagem, determina que a mesma seja manuseada sempre com o sentido da seta voltado para cima.</p> |
| | <p>“Empilhamento máximo”</p> <p>Localizado na lateral da embalagem, determina a quantidade máxima de caixa que pode ser empilhada durante o transporte e armazenamento.</p> |
| | <p>“Limite de temperatura”</p> <p>Determina o limite de temperatura dentre os quais a embalagem deve ser armazenada ou transportada.</p> |

Recomendações finais

Para garantir a vida útil de seu equipamento, reponha somente peças originais Dabi Atlante, as quais possuem a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pela empresa.

Utilize somente os serviços de uma Assistência Técnica Dabi Atlante, pois possui técnicos treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu equipamento.

Garantia do equipamento

Os “Termos de Garantia” constam no verso do Certificado anexo ao produto. Ficam vetadas quaisquer alterações ou concessões de garantia, condições e/ou autorizações, tanto verbais como por escrito, sem anuência prévia documentada pela Dabi Atlante.

Características técnicas

| Característica | 3L | 12LX | 19L |
|--|--|--|---|
| Pressão de esterilização (kgf/cm ² ± 0,2) | 2,3 | 2,3 | 1,3 / 1,7 / 2,1 / 2,3 |
| Temperatura de operação (°C ±1) | 134 | 134 | 121 / 127 / 131 / 134 |
| Tempos de esterilização (após atingir a pressão e temperatura de operação) (minutos) | 4 / 8 | 8 | 6 / 15 / 30 |
| Volume (litros) | 3 | 12 | 19 |
| Diâmetro da câmara (mm) | 126 | 196 | 229 |
| Profundidade da câmara (mm) | 220 | 380 | 434 |
| Reservatório de água interno (litros) | 1 | - | 2 |
| Dimensão Ext. - profundidade (mm) | 437 | 491 | 620 |
| Dimensão Ext. - largura (mm) | 367 | 428 (488 c/ alavanca aberta) | 480 |
| Dimensão Ext. - altura (mm) | 258 | 323 | 390 |
| Peso (kg) | 16 | 22 | 41,5 |
| Tensão (V) | 110/127 ou 220 | 110/127 ou 220 | 110/127 ou 220 |
| Potência (W) | 614 | 654 | 1750 |
| Amperagem (A) | 5,6(110/127V) / 2,8 (220V) | 6 (110/127V) / 3 (220V) | 16 (110/127V) / 8 (220V) |
| Abastecimento de água (automático) | Semi-automático através de válvula de acionamento e indicação visual | Manual através de copo dosador | Automático, com sensor de nível interno e reservatório interno com capacidade para 2,0 litros |
| Segurança | Válvula com abertura automática contra sobre pressão e sensor de sobre aquecimento | | |
| Sistema de segurança eletrônico de proteção por excesso de temperatura | Caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado, o sistema desligará a resistência e, na Autoclave 19L , o display indicará um código de erro. | | |
| Sistema de segurança eletrônico de porta aberta | Caso a porta da Autoclave não esteja bem fechada, entreaberta ou aberta, o sistema avisará sobre a situação. | | |
| Sistema de segurança mecânico de eliminação de excesso de pressão (válvula de segurança) | Caso a pressão da câmara de esterilização passar de 3,0 Kgf/cm ² , o mesmo passará a liberar a pressão evitando o aumento da mesma. | | |
| Construção | Gabinete em aço inoxidável/aço, câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304 | Gabinete em aço/alumínio, câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304 | |
| Registro Anvisa nº | 10101130048 | | |
| Indicação, finalidade ou uso a que se destina | Este produto é indicado para materiais que possam ser submetidos à temperatura de 134°C, vapor saturado e pressão de 2,3 kgf/cm ² nos processos de esterilização. | | |

Responsável Técnico: Leonel Issa Halak - CREA-SP 0600256918

Falhas, causas e soluções

| | |
|--------------|--|
| Falha | Botão ligado não acende. |
| Causa | Disjuntor desligado. |
| Solução | Religue o disjuntor uma única vez. |
| Causa | Cabo de alimentação desligado da rede elétrica. |
| Solução | Conecte o cabo na tomada. |
| Causa | Fusível queimado. |
| Solução | Troque o fusível observando a amperagem. |
| Causa | Chave liga/desliga desligada. |
| Solução | Ligue-a. |
| Falha | Vazamento de água na parte inferior da Autoclave. |
| Causa | Conexões com vazamento interno. |
| Solução | Chame Assistência Técnica Autorizada. |



www.dabi.com.br
Tel.: (16) 3512 1212